

DORSALGIE

La dorsalgie est une douleur qui débute à la base du cou et irradie jusqu'au milieu du dos, au niveau des vertèbres dorsales². La colonne dorsale ou thoracique est constituée de 12 vertèbres rattachées aux côtes et soutiennent la cage thoracique dénommées par les lettres D ou T (D1 à D12, ou T1 à T12)³.



LE MATÉRIEL

- 1 générateur **octiTENS Mini**
- 1 électrode lombaire
- 4 câbles de 14 cm




LES PROGRAMMES

	Programmes	Durée de stimulation	Nombre de séances
Gate Control	P1 P2	Supérieur à 30 min	Autant que nécessaire
Endorphinique	P3	De 30 min à 2h	1 à 3 fois par jour




POSITIONNEMENT

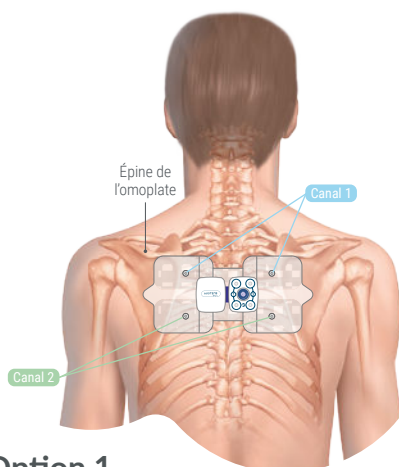

Option 1

Connectez les deux pressions situées en haut de l'électrode lombaire au canal 1 et celles situées en bas au canal 2.

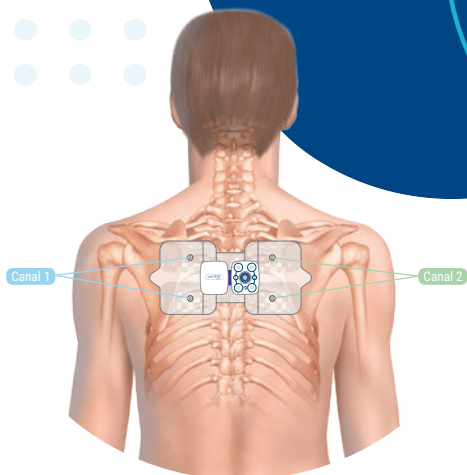

Option 2

Connectez les deux pressions situées à gauche de l'électrode lombaire au canal 1 et celles situées à droite au canal 2.

Sources :

1 - <https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/cervicalgie/definition-symptomes-causes>

2 - https://www.doctissimo.fr/sante/sante-au-quotidien/mal-de-dos/douleur-du-haut-du-dos-comment-la-soulager/e3c8b4_ar.html

3 - <https://www.medicine-des-arts.com/fr/le-rachis-generalites-anatomie.html>