

LOMBALGIE

La lombalgie est une douleur localisée dans la région lombaire de la colonne vertébrale. Elle se divise en deux catégories : la **lombalgie courante**, sans cause apparente telle qu'une fracture ou un tassement vertébral, et la **lombalgie symptomatique**, due à une condition spécifique¹.



LES PROGRAMMES

Programmes	Durée de stimulation	Nombre de séances
Gaïte Control P1 P2	Supérieur à 30 min	Autant que nécessaire
Endorphinique P3	De 30 min à 2h	1 à 3 fois par jour




LE MATÉRIEL

- 1 générateur **octiTENS Mini**
- 1 électrode lombaire
- 4 câbles de 14 cm




POSITIONNEMENT

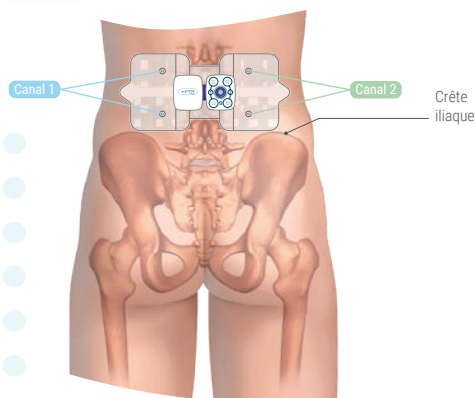

Option 1

Connectez les deux pressions situées à gauche de l'électrode lombaire au canal 1, et connexion des deux pressions situées à droite au canal 2.

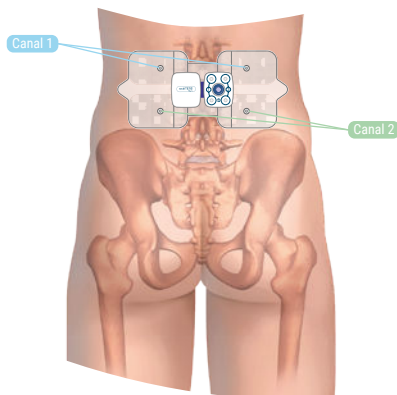

Option 2

Connectez les deux pressions situées en haut de l'électrode lombaire au canal 1, et connexion des deux pressions situées en bas au canal 2.